

SEP

수용성 분리재 (물로써 간단히 세척)




특징


- 간단히 얇게 도포 가능
- 도포후 두께가 얇다(Thin)
- 분리의 효과가 아주 좋다

용도


- 레진 인레이
- 레진 크라운 & 브릿지
- 잉여 세멘의 제거
- 템포러리 크라운
- 임플란트 보철물 장착시
- 자성 Attachment 접착시

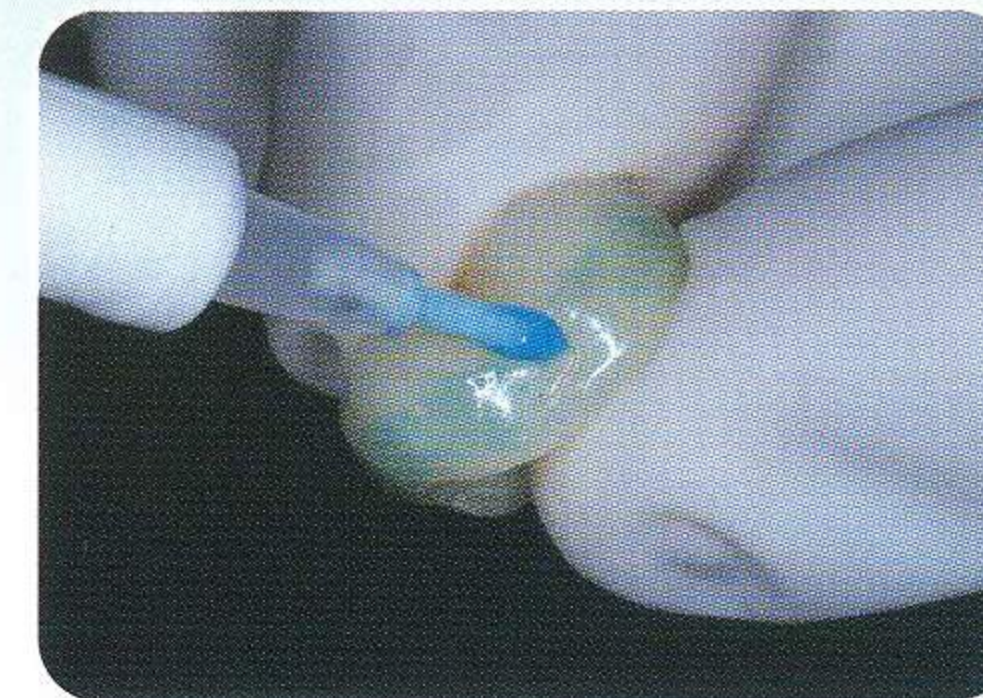


SEP 도포

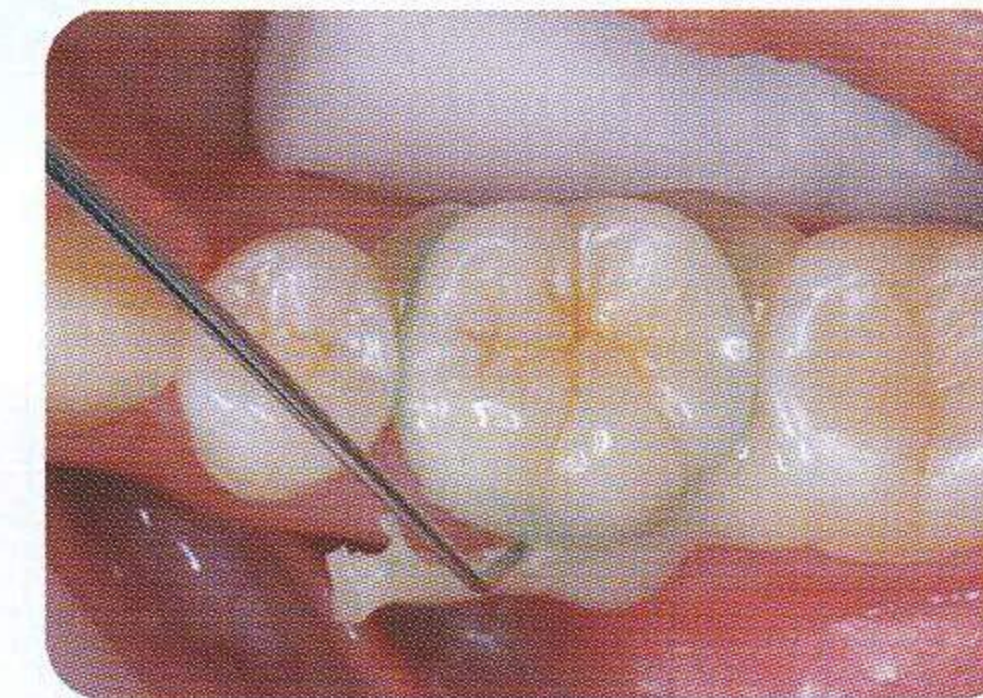


잉여 세멘의 제거

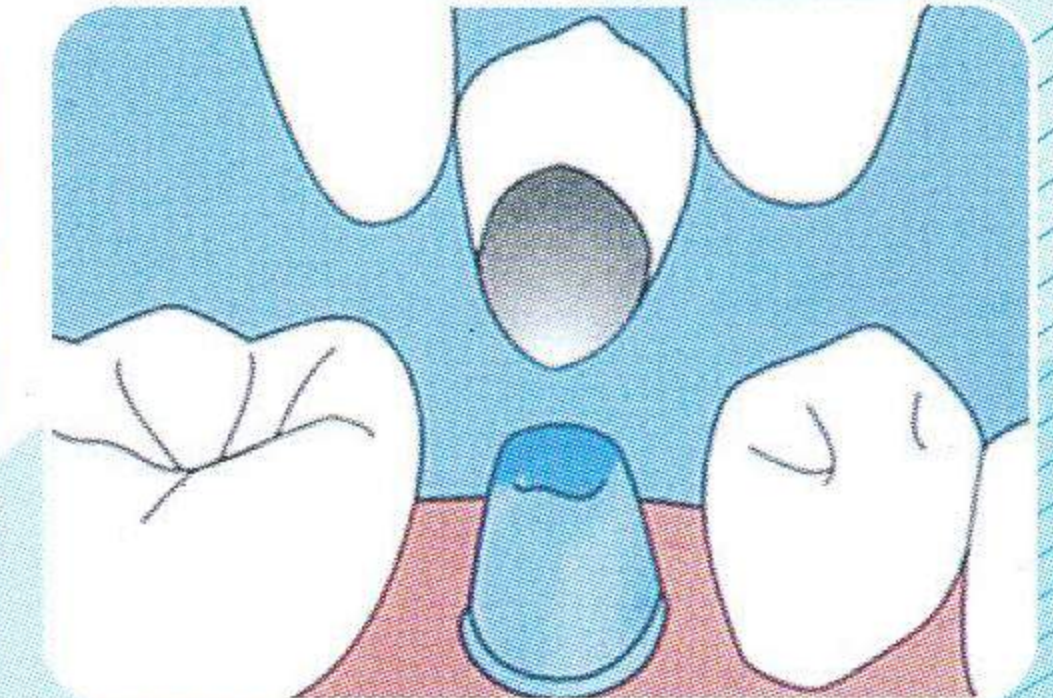

Temporary 제작후 지대치에 분리재로 사용

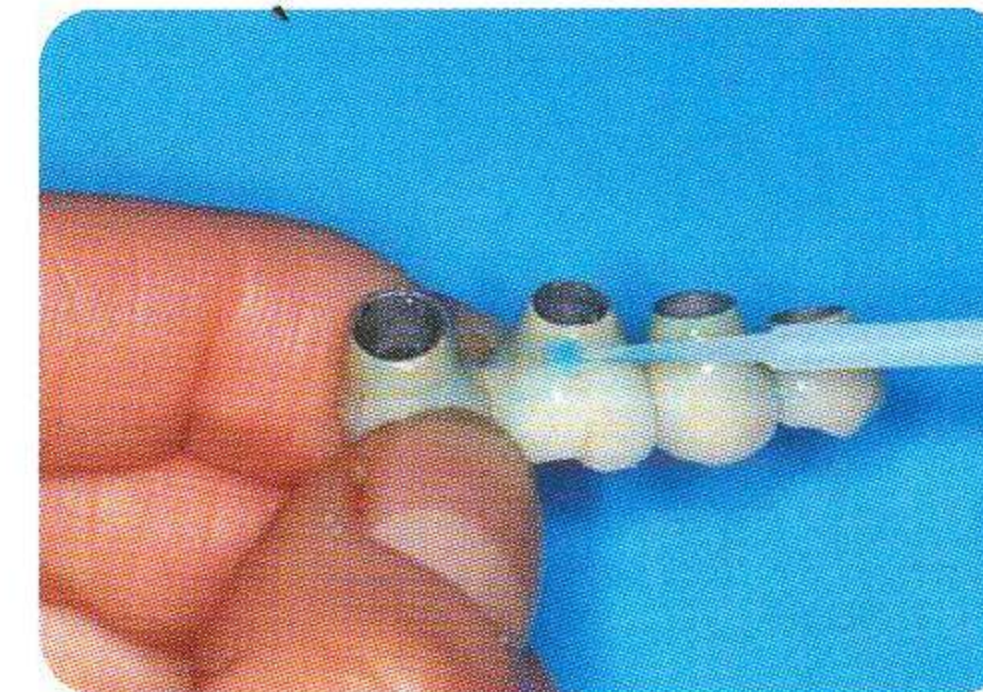

임플란트 보철물 장착시

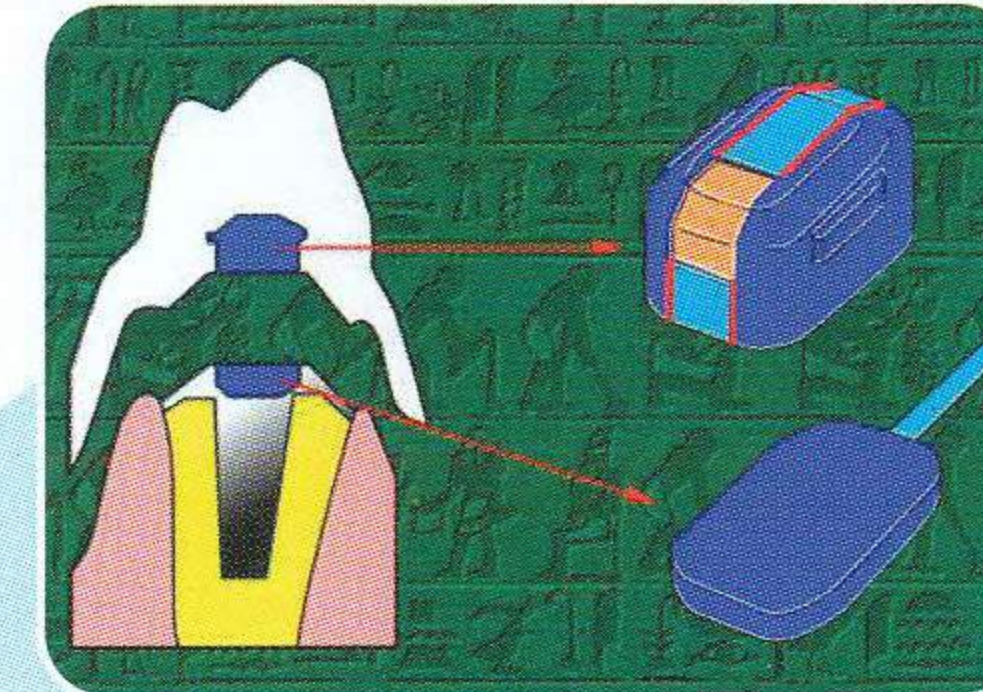

자성 Attachment 접착시



자성 Attachment 접착시

사용 Point

색	두께(μm)
색이 보이지 않는다	10~20
부분적으로 청색	약30
전체적으로 청색	40이상

구성 및 성분

구성품	성 상	조 성
Super Bond SEP	액 체	에탄올, 수용성 폴리머, 기타

보관방법

- 냉장고에 보관하지 말것
- 화기엄금

주의사항

- 본 재료의 사용에 의해 발진등의 과민증상이 나타나는 환자에게는 사용하지 말것
- 시술자는 글러브를 착용 할것
- 가연성이므로 화기가 있는 곳에서 사용하거나 보관 하지 말것



조광덴탈(주)

대표전화 02)773-2875

팩스 02)756-0981



Sun Medical Co.,LTD
www.sunmedical.co.jp/