

Zirconia Liner Premium

Premium


A Priming Agent for Zirconia Bonding.
ONE Bottle Type. Just Apply and Dry.



Zirconia Liner Premium	5 mL
Sponge (L·S)	1 box
Plastic Disposable Dish	5 개

Reliable Bond Strength

지르코니아 보철물에 레진시멘트 접착 시 지르코니아 표면에 **Zirconia Liner Premium** 을 적용하면 접착강도와 유지력이 증가하는 것을 볼 수 있다.

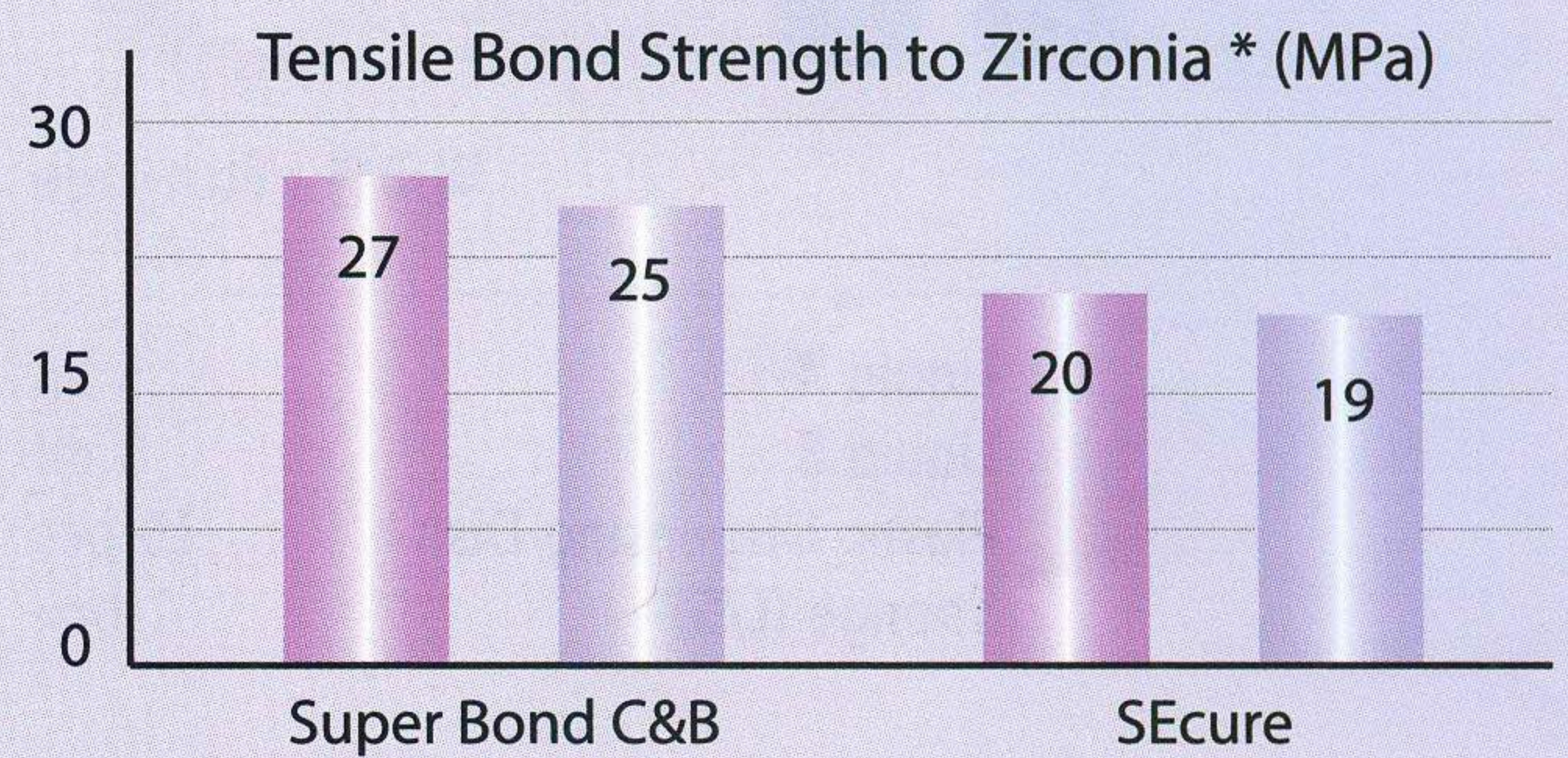

* The zirconia samples are sandblasted

Thermocycled 5,000 times (5~55)
Thermocycled 10,000 times (5~55)

Composition of the values of shear bond strength (MPa)

Group	Mean	Min	Max
NP	11.59±2.39	7.61	16.40
ZL	26.52±2.55	22.91	31.45

(NP, No primer ; ZL, Zirconia Liner Premium)

Clinical Procedure

① 지르코니아의 전처리

- 필요에 따라 접착면은 치과용연삭재료(Diamond Point등) 또는 Alumina 입자에 의한 Sandblast 처리 (0.1~0.2MPa 게이지 압력) 으로 거칠게 한 후 수세/건조한다.
- 또 타액 등에 의한 오염을 제거하기에는 인산 에칭제를 사용하는 것이 효과적이다.

② 도포

- Plastic Disposable Dish에 Zirconia Liner Premium 1방울을 떨어뜨린 후 Sponge로 피착면에 도포한다.
- 본 재료는 휘발성이므로 3분 이내에 사용해 주십시오.

③ 건조

- 가볍게 Air Blow 한다.

※ 주의사항

- 다습, 직사광선을 피해 실온(1℃ - 30℃)에서 보관한다.
- 본 재료의 사용에 의해 발진 등의 과민증상이 나타난 환자에게는 사용을 중지하고 의사의 진단을 받도록 한다.
- 본 재료는 피착면 이외에는 가능한 묻지 않도록 주의한다.
- 처리 후의 표면에는 손때나 기름 등이 부착되지 않도록 한다.